

注意事項（採取前）

<採取の1時間前から>

- 水以外の飲食は、NG
但し、水の摂取は制限ありません。
- 歯磨き、マウスウォッシュもNG



注意事項（採取時、保管方法）

- 採取キットは唾液採取前、採取後に関わらず常温で保管してください。
- 採取キットの漏斗部は使用前に絶対に回さないで下さい。



唾液の取り方

① チューブの下についているキャップを取り外します。




② 黒い線を十分に超えるまで唾液を入れます。



〈注意〉※1

③ チューブの底を軽く叩いて唾液をそこに落とします。

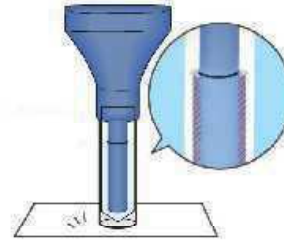

④ ろうと部分を回して取り外し保存液をチューブ内に入れます。



保存液が入ったことを確認する

⑤ キャップを回して固く閉めます。



重要!!

⑥ チューブを30回以上転倒し混和します。



⑦ 学校へ提出します。



〈注意〉※1
唾液の量が十分でない場合は検出不能と判定される場合がありますのでご注意ください。
なお、検出不能の場合は再検査できません。

※本マニュアルは、唾液採取キットと同梱されませんので、必ず検体採取される皆様にご展開ください。

採取キットの廃棄方法

漏斗部は、水で軽くすすいで付着物を取り、その後、梱包ケースとともに**家庭ごみ**として、廃棄して下さい。

